

ASSY2000

UN MUNDO SIN PIOJOS





PEDICULOSIS

La pediculosis se define como una infestación -invasión- del cuero cabelludo provocado por la presencia de *Pediculus capitis*, también conocida como piojos.

Es una enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad y sexo, aunque se presenta mayoritariamente en niños de 3 a 14 años en edad escolar, debida al alto nivel de infestaciones que se presenta en la escuela primaria.

Apesar de la creencia común, la pediculosis no ocurre como resultado de la falta de higiene, nise encuentra exclusivamente en hogares pobres o necesitados. Los piojos se instalan en una cabeza en particular en busca de un lugar apropiado para vivir y reproducirse. Este hábitat ideal, consiste en una adecuada combinación de temperatura, humedad y PH en el cuero cabelludo, lo que no tiene nada que ver con la higiene ni con el nivel socioeconómico de las personas. Este trastorno tampoco es exclusivo de una región en particular. De hecho, está creciendo cada vez más en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados.


Este trastorno tampoco es exclusivo de una región en particular. Tiene una presencia masiva en todo el mundo y, de hecho, sus niveles han ido aumentando en los países más desarrollados:

- En los EE.UU , El 43% de los niños se ven afectados por la pediculosis cada año.
- En Francia, el nivel de infestación ha crecido un 47%.
- En Reino Unido , las ventas de productos para matar piojos han aumentado en un 62%.
- En Brasil ,se vendieron más de 15 millones de unidades de productos antipiojos en el último año.

El síntoma principal que aparece en los niños infectados de piojos es un picazón intenso en el cuero cabelludo, generalmente en la nuca y detrás de las orejas. La picazón ocurre cuando un piojo perfora el cuero cabelludo para succionar sangre para su propia alimentación. Este picor induce al niño a rascarse compulsivamente y esto, a su vez, provoca irritaciones e inflamación del cuero cabelludo.

Los piojos no pueden saltar ni volar; se transmiten a través del contacto de cabeza con cabeza .Es por eso que la escuela primaria constituye un lugar típico de contagio, debido al estrecho contacto físico que los niños tienen entre sí durante los juegos y actividades diarias.

CICLO BIOLÓGICO DE LOS PIOJOS

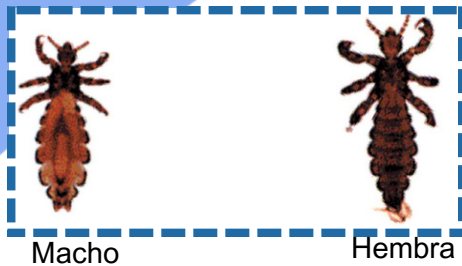

Hay piojos machos y hembras, su tamaño es diferente. Los piojos hembras son más grandes y miden entre 2,5 y 4 mm.


Existe un gran equilibrio entre los géneros; normalmente el 50% del total son hembras.

Las liendres son tegumentos totalmente herméticos que optimizan la temperatura de eclosión para que los piojos puedan desarrollarse y crecer en el interior hasta el momento de su nacimiento.

A lo largo de su ciclo de vida, cada piojo hembra deposita sobre la cabeza humana un mínimo de 150 liendres y un máximo de 300 liendres.

Cada una de estas liendres dará a luz a un nuevo piojo. El 50% de estos nuevos piojos, a su vez, serán hembras, y estas hembras volverán a poner de 150 a 300 liendres cada una ... y así sucesivamente.

Este proceso creciente e interminable se llama “ ciclo biológico de los piojos”

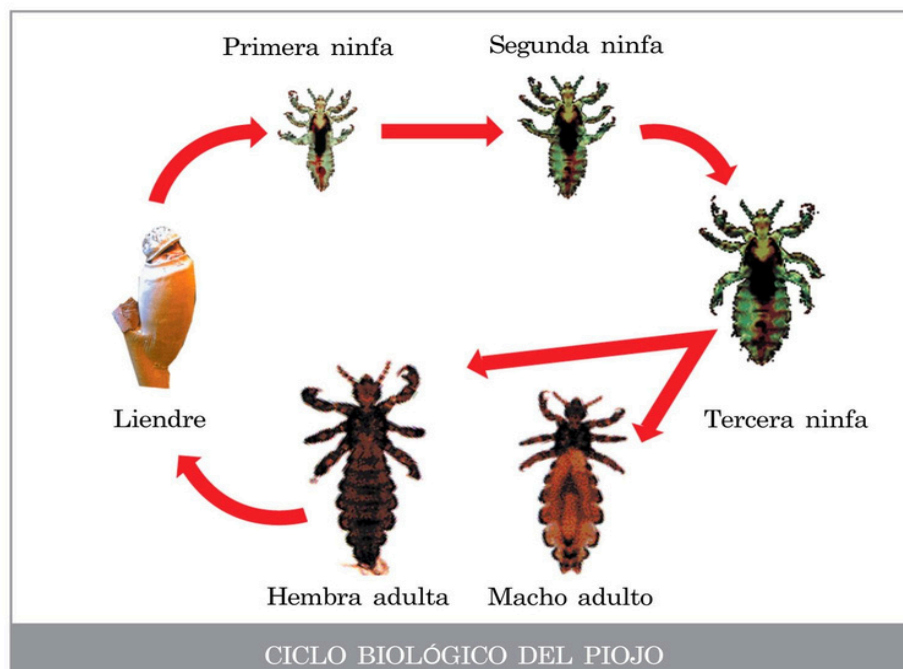


EJEMPLO CUANTITATIVO DEL CICLO BIOLÓGICO.

Si un niño tiene 4 piojos en la cabeza, al menos dos de ellos (aproximadamente el 50%) serán hembras. Estos piojos hembras pondrán un mínimo de 150 liendres cada uno, por lo tanto el niño seguirá teniendo en la cabeza 4 piojos(2 machos y 2 hembras) , pero también tendrá 300 huevos-liendres.

Si el ciclo no se interrumpe, estas 300 liendres se convertirán en 300 piojos nuevos; el 50% serán hembras (150) y cada una de ellas pondrá otras 150 liendres, es decir, un total de 22.500 huevos-liendres.... y así sucesivamente.

Entonces,..... A menos que se interrumpa el ciclo biológico, el problema seguirá creciendo.

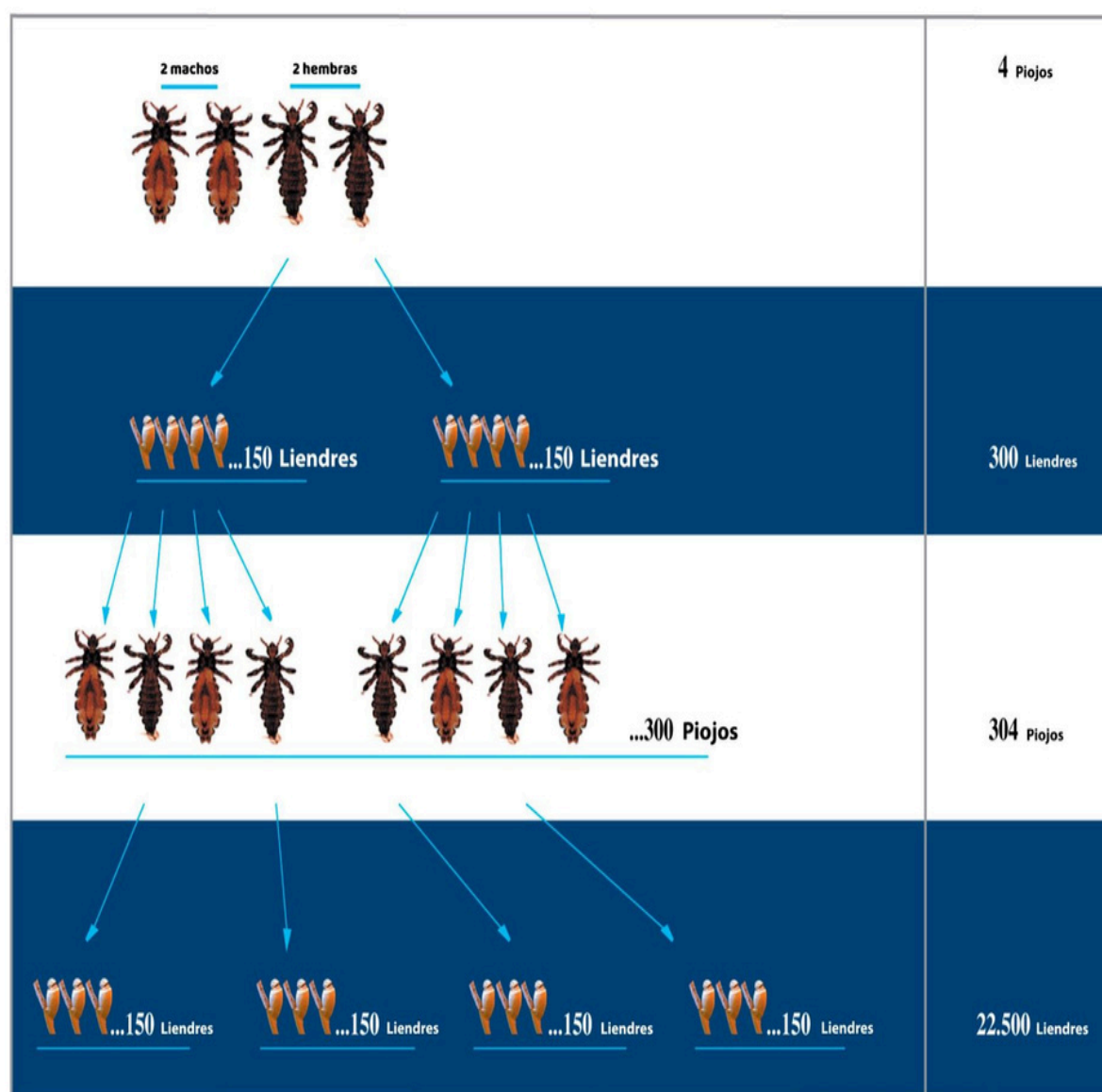



IMPORTANTE CONCLUSIÓN

· Aunque la pediculosis siempre se ha definido como una infestación de piojos en la cabeza, hemos visto que los piojos hembra deposita sus huevos, llamados liendres, en esa misma cabeza. Y también esas liendres se convertirán en nuevos piojos, ya que es así el ciclo biológico de este parásito.

· También hemos entendido que al menos que se interrumpa este ciclo biológico, el problema crecerá en proporción a la relación entre piojos y liendres que, como hemos visto, una sola hembra de piojos es capaz de incubar un mínimo de 150 liendres durante su ciclo vital.

· Históricamente, los científicos han investigado sobre cómo matar los piojos y han descubierto a lo largo de los años una serie de fármacos eficaces para tal fin. (También se ha descubierto que cada vez son más resistentes a estos productos).

· Sin embargo, hemos visto que la pediculosis no consiste en solo un problema, es decir, los piojos. Más bien tiene dos frentes de batalla para combatirlos: “piojos” por un lado y “liendre” por otro.

· Para combatir eficazmente la pediculosis, matar el 100% de piojos no es suficiente, también es necesario eliminar el 100% de las liendres, o de lo contrario se convertirán en nuevos piojos (reinfestación).

· Sin embargo, a la luz de los estudios más recientes sobre el tema, está absolutamente probado desde un punto de vista científico, que todos los medicamentos descubiertos hasta ahora en todo el mundo tienen un porcentaje bastante alto antipiojos, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de matar a las liendres, en un grado superior al 40%.

· También está científicamente probado que cualquiera de estos medicamentos podría alcanzar el 100% de matar piojos y liendres, solo aumentando su concentración a niveles que lo harían tóxico para los seres humanos.

· Finalmente, dado que los fármacos antipiojos disponibles en el mercado no son capaces de interrumpir el proceso biológico (ya que no pueden acabar con el 100% de las liendres) el problema persistirá, ya que a partir del 7 o 8 día aparecerán nuevos piojos, nacidos de las liendres vivas restantes, (reinfestación) (re-invadiendo) la cabeza del niño. Además, esta reinfestación será de un mayor número de piojos.

· Por tanto, la conclusión que llegamos es que existe un problema científico que no se resuelve, es decir, cómo eliminar el 100% de las liendres del cabello, para evitar la reinfestación.



ANÁLISIS DE

MERCADO

·SUMINISTRO



Los productos pediculicidas de todo el mundo han declarado históricamente en sus etiquetas que “mataban piojos y liendres”, atribuyéndose así un poder para matar liendres como si fuera del 100%.

A pesar de esto y curiosamente, la mayoría de estas marcas incluyen en sus packs un peine de plástico, con el que recomiendan quitar las liendres tras la aplicación del producto líquido. Esto significa que, a pesar de las promesas impresas en sus etiquetas, de alguna manera están reconociendo una cierta ineficacia del producto en cuanto a las liendres, y por eso recomiendan el uso de un peine de plástico para su extracción.

Un caso en concreto que muestra la ineficacia de los productos para matar las liendres es la disposición emitida por la Comisión Federal de Comercio de los EE.UU., Que obligó a todas las marcas de productos para matar piojos en el mercado estadounidense a eliminar de sus etiquetas la promesa de matar las liendres. Dejando solo el reclamo de matar piojos. La disposición también obliga a los laboratorios de la competencia a incluir en su publicidad la aclaración de que estos productos líquidos no pueden matar las liendres y la recomendación de eliminarlas con ayuda de algún otro dispositivo mecánico eficaz.

Los antecedentes de esta disposiciones emitidas por la Comisión Federal de Comercio se pueden encontrar en los siguientes sitios web:

www.ftc.gov/opa/1998/9809/headlice.htm

www.ftc.gov/opa/1998/9812/petapp6298.htm

www.ftc.gov/opa/2000/04/licesurf.htm

Por otro lado y curiosamente, las marcas de eliminación de piojos en todo el mundo tampoco prestaron atención a la ineficacia de los peines que proporcionan dentro de sus paquetes para eliminar las liendres. Estos peines no son útiles, ya que sus dientes suelen ser cortos y delgados, normalmente de plástico, y con demasiada separación entre las púas, suelen ser demasiado débiles para combatir la rígida resistencia que ofrecen las liendres a ser arrastradas.

Esto significa que la industria farmacéutica no solo a sido incapaz de descubrir un fármaco con un poder del 100% de eliminar las liendres, sino que nunca ha buscado una alternativa eficaz a los peines para tratar y resolver el problema de las liendres.

Por tanto, los tratamientos que se comercializan actualmente en todo el mundo para combatir la pediculosis son incompletos: matan un porcentaje muy alto de piojos, pero no pueden combatir ni eliminar las liendres.

CONCLUSIÓN:

En el lado de la OFERTA, dentro de la categoría de pediculosis, hay un campo aún sin explotar: ofrecer una solución real para hacer frente al problema de las liendres.

·DEMANDA



La imposibilidad de eliminar las liendres constituye una necesidad insatisfecha, como expresa explícitamente la mayoría de consumidores de mercado: madres de niños de entre 3 a 14 años.

Muchas de ellas sienten la necesidad de eliminar las liendres del cabello de sus hijos al menos por razones estéticas, incluso cuando pueden no ser conscientes del ciclo biológico de los piojos o de la ineficacia de los productos para matar piojos.

La mayoría de ellos también afirman que.... los peines “provistos gratis con los productos para matar piojos” no son útiles para eliminar las liendres.

Un buen número de estas madres incluso dicen que terminan haciendo este trabajo a mano, con las puntas de los dedos o las uñas, quitando liendre por liendre.

CONCLUSIÓN:

Por el lado de la DEMANDA, la eliminación de las liendres es una necesidad absolutamente insatisfecha que los consumidores declaran explícitamente como tal.

·EXISTE UNA GRAN OPORTUNIDAD

La necesidad insatisfecha de las madres, ante la imposibilidad de eliminar las liendres, además de la importancia científica de hacerlo, como única forma de interrupción del ciclo biológico de los piojos, se traduce en un gran oportunidad de negocio dentro de la categoría de pediculosis, que parece sin explotar en la mayoría de países del mundo.

EL lanzamiento de un producto especialmente diseñado para eliminar eficazmente el 100% de las liendres constituye un negocio indiscutible en cualquier región del mundo.

El producto involucrado sería altamente innovador desde la percepción de la demanda, ya que representaría un invento destinado a resolver una necesidad insatisfecha del mercado.

Ampliara la categoría de la pediculosis, aspecto importante para los canales de distribución, ya que no constituye un sustituto de los productos antipiojos, sino un complemento destinado a garantizar la eficacia de un tratamiento integral de la pediculosis (piojos+liendres)

El hecho de que no sea un producto sustitutivo, sino complementario, determina que “el mercado potencial en unidades a ser atraídas por este producto no sería meramente una parte del actual mercado antipiojos, sino la totalidad del mismo”..



Incluso cuando el mercado involucrado estuviera liderado por alguna marca tradicional, el lanzamiento de este nuevo producto también constituye un buen negocio, ya que no competiría con dicha marca. Abriría un nuevo segmento dentro de la categoría, el segmento de las liendres, en el que se posicionaría como el único líder.

En conclusión, el lanzamiento de un producto eficaz para la eliminación de las liendres sería en todos los casos un negocio nuevo y atractivo dentro de la categoría de la pediculosis.

Así nació el peine ASSY 2000 , la herramienta más eficaz para combatir las liendres.

Apartir de entonces , ASSISTANCE inició su expansión hacia los mercados externos, buscando distribuidores exclusivos con quienes repetir en sus respectivos países la estrategia ASSY que se había demostrado con éxito en el mercado argentino.

El peine ASSY 2000 ya se lanzó y se comercializa con éxito en,

- AMÉRICA LATINA: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela,

-Estados Unidos y Canadá.

-EUROPA: España, Portugal, Francia, Italia, Reino unido

-Israel

-Japón

-OCEANÍA: Australia, Nueva Zelanda



ASSY 2000

**UNA NUEVA HERRAMIENTA
PARA UN VIEJO PROBLEMA**



ASSY 2000

LA HERRAMIENTA MÁS EFECTIVA PARA COMBATIR LOS PIOJOS Y LAS LIENDRES.

ASSY 2000 es un producto con características técnicas especiales. Fue diseñada con el objetivo de englobar en las siguientes cualidades:

-ALTA EFICACIA para eliminar el 100% de las liendres y 98% de piojos de contagio.

-SEGURIDAD para proteger el cabello y el cuero cabelludo de los niños.

-VERSATILIDAD para lograr la misma eficacia en todo tipo de cabellos.

-FUNCIONALIDAD para su fácil uso y limpieza.

-FUERZA Y RESISTENCIA para constituir un bien duradero.

-ESTÉTICA, con un diseño de vanguardia para ser un producto atractivo y de fácil uso.

Además, también se diseñó una tecnología de fabricación particular para que el peine ASSY 2000 cumpla con una serie de especificaciones técnicas precisas, a fin de convertirlo en la herramienta más eficaz hasta ahora conocida para combatir y eliminar eficazmente el 100% de las liendres.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PEINE ASSY 2000

1.TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TEMPLADO Y SATINADO.

ASSY 2000 es un producto de alta resistencia debido a los aceros de composición especial que se utilizan para fabricar tanto su mango como sus dientes.

Su acero templado e inoxidable está preparado para estar en contacto con agua, vinagre y todos los diferentes fármacos antipiojos, sin que dicha exposición afecte a los requisitos técnicos microscópicos que aseguran su eficacia ni altera su aspecto con el tiempo.

Es un bien duradero. Por eso, puede comercializarse en un precio elevado y sigue siendo igualmente atractivo para los consumidores desde el punto de vista económico.

La superficie satinada en acero crea un valor adicional para el posicionamiento del producto. En primer lugar, realza la estética y el atractivo del peine, justificando así su posición como producto premium. Por otro lado, se percibe como un producto altamente aséptico, que en la visión de las madres cobra aún más valor su función específica como parte de un tratamiento sanitario.

Dado que está fabricado íntegramente en acero, ASSY 2000 puede hervirse para la asepsia si los consumidores lo desean y, por lo tanto, puede ser utilizado por otro miembro de la familia, sin riesgo de contagio.

2.MANGO REDONDEADO.

El mango redondeado de ASSY 2000 fue especialmente diseñado para evitar la presencia de extremos afilados o bordes que puedan dañar las manos o afectar a su correcto uso. Los consumidores ratificaron esta calidad ventajosa en las investigaciones de mercado. Afirmaron que el peine se usa y maneja fácilmente, lo que particularmente es apreciado ya que permite a los niños hacer la tarea de peinarse ellos mismos.

En nuevos mercados, el mango redondo del peine favorece el recuerdo visual del producto así como el sentido del agrado -la pequeña redondez metálica- por parte de los consumidores, posicionándose así como un producto amigable.





3.BANDAS ANTIDESLIZANTES EN LA PARTE DEL MANGO.

Esta característica fue solicitada y diseñada por las propias madres, al participar en la investigación de mercado realizada en la etapa de desarrollo del peine ASSY 2000.

El motivo fue que los tratamientos contra los piojos normalmente se llevan a cabo en el baño o debajo de la ducha, donde las manos están mayormente mojadas, y resbaladizas.

Por lo tanto, las bandas en el mango realizan una función antideslizante, lo que permite que tanto la madre como el niño tenga un mejor control al manipular el peine.

Las bandas antideslizantes también mejoran la estética del producto.

ASSY 2000 está fabricada en tres colores: verde, rojo y azul.


Esto ofrece la posibilidad de elegir el color, pero también fomenta la posibilidad de que un consumidor compre no sólo un peine, sino uno de cada color diferente para cada niño, como si fuera un cepillo de dientes.



4.DIENTES LARGOS DE ACERO.

A diferencia de los peines de varillas cortas, ASSY 2000 tiene varillas largas que aseguran su eficacia en cualquier tipo de cabellos: cortos, largos, finos, gruesos y abundantes. tal versatilidad lo convierte en un producto universal.

Además, los dientes largos aumentan la superficie de arrastre del cabello, mejorando así su capacidad de arrastre en comparación con los peines de varillas cortas.

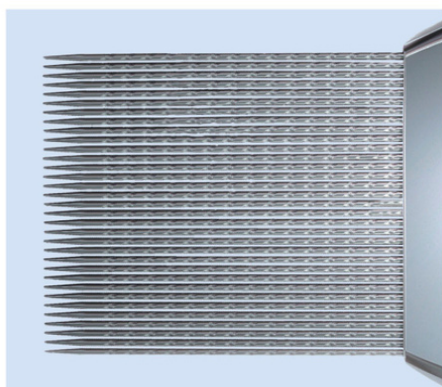



5. SEPARACIÓN EXACTA ENTRE VARILLAS.


La separación entre las varillas es lo suficientemente exacta como para despegar y arrastrar el 100% de las liendres.

Las liendres son huevos de forma ovoide cuyo tamaño menor varía entre 0,2 y 0,3 mm.

La separación entre las varillas de ASSY 2000 es de 0,09mm, es decir, más estrecha que el tamaño de la liendre más pequeña.

Por lo tanto, las liendres inevitablemente quedan atrapadas entre las varillas y se arrastran lejos del cabello con solo peinarlos.

Además, la separación entre las varillas en la ASSY 2000 es la exacta para arrastrar todas las liendres y, sin embargo, respeta la anatomía del cabello.

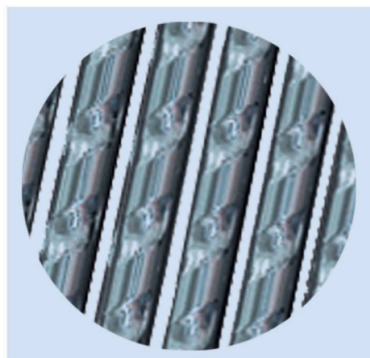

6. NI CORTA NI TIRA DEL CABELLO.

ASSY 2000 está fabricada con un tipo de acero cuya resistencia a la flexión es tan precisa que hace que sus varillas sean capaces de arrastrar hasta las liendres más pequeñas y sin embargo no cortar ni tirar del cabello.

Esto se logra porque, a diferencia de los peines con mango de plástico, en la ASSY 2000 las varillas se fijan al mango por encima del extremo inferior del mango.

Una exclusiva tecnología de soldadura láser permite fijar cada varilla a una altura controlada dentro del mango.

Esta característica marca una diferencia determinante en cuanto a viabilidad entre la ASSY 2000 y cualquier otro peine con mango de plástico, ya que esta es precisamente la razón por la que este último tira y corta el cabello.

Veamos por qué:

Durante el proceso de peinado, los mechones de cabello tienden a deslizarse desde los extremos de las varillas hacia el mango. Las varillas de los peines de plástico se fijan rígidamente en el mango mediante el plástico inyectado entre ellas.



Esto les hace incapaces de ceder en un punto determinado, es decir, no pueden desprenderse entre sí, atrapando así el mechón que lo atraviesa, tirando de él y cortando el cabello.

Esto es doloroso para los niños y por lo tanto provoca un rechazo al peinado, así como la frustración de la madre, lo que hace que el producto sea inviables.

Mientras que en la ASSY 2000, las varillas se fijan por encima del extremo inferior del mango, lo que confiere la flexibilidad necesaria entre las varillas en toda su extensión, incluso en el punto de entrada al mango.


Como resultado de esto, las varillas pueden separarse entre sí, lo que garantiza que los mechones puedan deslizarse entre ellas sin tirones o cortes del cabello.

7. PUNTAS MICROSCÓPICAMENTE REDONDEADAS.

Esta característica es de suma importancia y constituye un fuerte factor diferenciador del peine ASSY 2000.

A diferencia de otros peines, los extremos de las varillas de la ASSY 2000 están perfectamente redondeados , para evitar rascar o pinchar, cuidando el cuero cabelludo de los niños.

El proceso de fabricación y redondeo de los extremos de las varillas se realiza con tecnología de serie especial que asegura la conservación constante de esta característica, incluso en el caso de grandes lotes de fabricación.

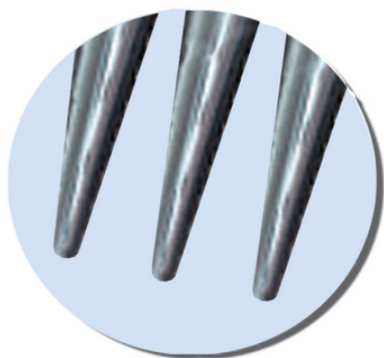

8. TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE SOLDADURA LÁSER.

El proceso de soldadura por láser utilizado para fijar las varillas en el mango del peine ASSY 2000 es un método de fabricación patentado en todo el mundo por Assistance OTC Products.

La precisión y alta eficacia obtenida mediante este tipo de soldadura asegura la fuerza y resistencia del peine, convirtiéndolo en un producto duradero en el tiempo.

9. EL PODER DE SUS DIENTES MICROACANALADOS.

La característica más señalada del peine ASSY 2000 son sus dientes microacanalados, que explica el alto rendimiento funcional del peine en el tratamiento de la pediculosis, y su eficaz eliminación tanto de piojos como de liendres.

Los estudios de investigación de mercado , realizados en varios ámbitos, grupos focales y pruebas de uso del producto, indican que los usuarios aprecian y reconocen su alta efectividad , así como su utilidad y ahorro de tiempo en la ardua tarea de la eliminación de las liendres..



VENTAJAS DE LOS DIENTES MICROACANALADOS.

El microacanalado consiste en surcos tallados en la superficie de la varilla, en forma de espiral, que rodea toda la superficie de la varilla.

Estas ranuras proporcionan a cada varilla dos características que aumentan sustancialmente su eficacia en la lucha contra los piojos y las liendres, frente a cualquier varilla normal:

A. MEJOR RENDIMIENTO DE ARRASTRE.

Desde un punto de vista mecánico, las ranuras, por sí mismas, agregan rugosidad a la varilla, ya que modifica sustancialmente la geometría de una varilla lisa.

Los bordes de estas ranuras son los elementos más importantes de este aumento de rugosidad, ya que constituye un obstáculo adicional para todo lo que se desliza por las varillas.

Son estos bordes los que aumentan la capacidad de las varillas para enganchar, despegar y arrastrar piojos y liendres durante el peinado.



Esto lleva a la conclusión de que los dientes microacanalados son más efectivos que cualquier varilla simple en su capacidad de arrastre, ya que su mayor rugosidad disminuye la posibilidad de que los piojos y las liendres escapen o se deslicen una vez que quedan atrapados entre las varillas.

B. CAPACIDAD DE LESIONAR MICROSCÓPICAMENTE LOS PIOJOS Y LAS LIENDRES.

Al observar las ranuras bajo un microscopio, puedes notar que el material no es liso, sino superficialmente irregular, tanto en los bordes como en la muesca.

Si esta irregularidad superficial se amplía aún más bajo un microscopio, se pueden visualizar como una serie de picos, que en realidad representan bordes cortantes microscópicos en la superficie del material. Estos bordes cortantes microscópicos pueden causar microlesiones en las paredes de las liendres cuando son tocadas por las varillas del peine durante el peinado, y también pueden dañar las patas y antenas de los piojos cuando quedan atrapados entre las varillas durante el peinado.

Al dañar las liendres, el microacanalado consigue romper sus paredes herméticas, haciendo inviable que puedan nacer piojos de su interior, ya que la hermetización de la liendre es una condición esencial para que los piojos se desarrollen dentro de sus huevos.

En cuanto a los piojos, se encuentran totalmente discapacitados, desorientados e inmovilizados como consecuencias de las lesiones en sus antenas o patas.

Por último, el microacanalado de la ASSY 2000 puede dañar microscópicamente a los piojos y las liendres, sin afectar la superficie del cabello. Esto se debe a que sus varillas están hechas de un acero inoxidable especial cuya dureza superficial es menor que la dureza superficial del cabello.





ASSY 2000

¿POR QUÉ ASSY 2000 ES LA HERRAMIENTA MÁS EFICAZ PARA CONTROLAR LA PEDICULOSIS?

1. DIENTES LARGOS

Su condición de largos aumenta el área útil de arrastre permitiendo sacar más piojos y liendres en menos pasadas. Además los dientes largos aseguran la efectividad en todo tipo de cabellos: cortos, largos, finos, gruesos o abundantes.

2. EXACTA SEPARACIÓN ENTRE DIENTES

Las liendres tienen forma ovoide, miden 0,5 mm de largo por 0,2 a 0,3 mm de ancho y están fuertemente adheridas al cabello con un poderoso cemento que hace que las mismas sean muy difíciles de despegar.

La separación entre los dientes de ASSY 2000 es menor que el tamaño de las liendres más pequeñas. Por eso las arrastra hasta removerlas totalmente del pelo.

3. EXCLUSIVOS “DIENTES MICROACANALADOS”

El microacanalado consiste en microscópicos filos distribuidos a lo largo del diente en forma de espiral apretada. Estos filos tienen la capacidad de producir micro lastimaduras en distintos puntos de las liendres. Esto, sumado a la acción de arrastre las destruye, rompiendo su hermetismo, y asegurando su inviabilidad.

4. PUNTAS MICROSCÓPICAMENTE REDONDEADAS

Las puntas del peine ASSY 2000 están fabricadas con un sistema de altísima precisión mediante un proceso computarizado y automatizado. De esta manera se logra el perfecto redondeo de las mismas evitando pinchar, raspar y/o lastimar el cuero cabelludo.

5. RESPETA LA ANATOMÍA DEL CABELLO

La resistencia a la flexión de los aceros empleados en la fabricación de los dientes es necesaria para arrastrar y destruir hasta la liendre más pequeña, manteniendo la flexibilidad justa para respetar la anatomía del cabello. Es decir, para peinarlo sin tirones ni cortes.



6. SE PUEDE HERVIR PARA ASEPTIZAR

Los aceros especiales usados en la fabricación del peine ASSY 2000 permiten hervirlo para que pueda ser usado por todos los integrantes del grupo familiar sin riesgo de contagio.

7. RESISTENTE Y DURABLE

La "tecnología láser" de fabricación, los aceros inoxidable utilizados y los estrictos controles de calidad a los que está sometido, hacen del peine ASSY 2000 un producto muy resistente y durable en el tiempo. Esto permite además, que el peine esté en contacto con los diferentes productos químicos usados en los tratamientos, o inclusive mojado sin alterar su eficacia ni su apariencia en el tiempo.

8. MANGO CON BANDAS ANTIDESLIZANTES

Las bandas antideslizantes permiten manipular mejor el peine haciéndolo más cómodo de usar sin que se resbale de las manos, ya que estás, al practicar los tratamientos en el baño o en la ducha, por lo general se encuentran húmedas y también resbaladizas.

9. ALTERNATIVA NATURAL Y DE CONTROL

En el caso de niños alérgicos o hipersensibles al uso de piojicidas químicos, el peine ASSY 2000 se convierte en la única alternativa natural, segura y eficaz de eliminar el 100% de los piojos y las liendres. Por otra parte, en épocas de fuerte contagio, peinando una vez al día se logra una detección temprana del problema permitiendo realizar el tratamiento a tiempo.

10. ADQUISICIÓN ECONÓMICA CONVENIENTE

El hecho de que pueda ser usado por todos los integrantes del grupo familiar sumado a su condición de resistente y durable, hacen del peine ASSY 2000 adquisición económica y rápidamente amortizable.



PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZAN LOS PRODUCTOS ASSY

USA - CANADA- MEXICO

ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - PERÚ

BRASIL - BOLIVIA - COLOMBIA - VENEZUELA

ESPAÑA - FRANCIA - ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA - REINO UNIDO

HOLANDA - BÉLGICA - SUECIA - NORUEGA - ISRAEL

JAPÓN - INDONESIA - AUSTRALIA -NUEVA ZELANDA



ASSISTANCE S.R.L.

Buenos Aires , Marzo 2018

Por la presente carta Assistance SRL informa que el Sr. Gonzalo Beltrán García, es el distribuidor en exclusiva de la línea de productos marca ASSY para España , Portugal y Andorra.

- PEINE : ASSY 2000
- LOCIONES : Assy Max, Assy Power, Assy Terminator
- COMBO : Pack Ahorro Max

ASSISTANCE SRL. Empresa ubicada en Argentina, es la propietaria de los productos arriba mencionados como así también de las marcas y las patentes de invención que los protegen.

Se otorga la distribución en exclusiva para los territorios de España, Portugal y Andorra, bajo condiciones estipuladas en un contrato privado firmado entre ambas partes para tal fin.

Se extiende la presente carta para que pueda ser presentada ante quien corresponda.

Atentamente.

Ing. Jorge Burchakchi
ASSISTANCE SRL
Partner & Director

**Mansilla 2686 – Piso 3 – Of. 8
C1425BPD – Capital Federal
Tel.: (54 – 11) 4963.0440
CABA – Argentina**